



JALOSOME® ORAL BARRIER

Jalosome™ Ağız İçi Bariyer Jel

Ağız içi Mukozit tedavisinde kullanılan tıbbi bir jeldir.

ÜRÜN TANIMI:

JALOSOME Ağız içi Bariyer Jel, Ağız içi mukozitlerin ağrılı semptomlarının kontrolü için kullanılan bir üründür. Oral Bariyer Jel, muko-yapışkanlık (mucoadhesive) özelliği sayesinde mukoza üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturur. Oluşan koruyucu film tabakası, ağız içini nemlendirir, kayganlaştırır ve zararlı faktörlerden korur. Hücre yenilenmesini destekler.

KULLANIM ALANLARI:

- Radyoterapi nedeniyle oluşan Mukozitler
- Kemoterapi nedeniyle oluşan Mukozitler
- Aft
- Ülser
- Aftöz Stomatitis
- Ağız içi cerrahi müdahale
- İmplantoloji (Diş implant tedavisi)
- Protezlerden ve Ortodontik müdahalelerden kaynaklanan travmatik ülserler

AĞIZ İÇİ MUKOZİT GÖRÜLME OLASILIĞI:

- %30 - %40 Kanser Hastaları
- %85 Baş – Boyun Kanser Hastalarında

İÇERİĞİ:

- **Hiyalüronik Asit**

- Hücre yenilenmesini destekler, iyileştirici ve Anti-İnflamatuar etkisi vardır.

- **Pantenol**

- Yüksek nemlendirme özelliğine sahiptir. İnflamasyonu azaltır ve ilgili ağrıyı tedavi eder.

- **Aloe Vera Jel**

- Mukozada koruyucu bir bariyer oluşturur ve mukozitin ağrılı semptomlarını tedavi eder.

- **Althaea Pitokopleks**

- Semptomları yatıştırmak ve tahrişlerden korumak için koruyucu bir bariyer oluşturur.

İÇERMEZ:

- Laktoz
- Gluten

KULLANIM ŞEKLİ:

- İhtiyaca göre GÜNDE 3 defaya kadar kullanılır.
- Ellerinizi yıkayınız.
- Tekli pakette bulunan Jalosome Ağız İçi Bariyer Jelin tamamını ağız içine sıkınız ve Jeli ağız içinde gezdiriniz.
- Jelin ağız içinde damak, dil, yanak içleri ve tüm çevresel dokulara yayıldığından emin olunuz.
- Ağız içinde fazlalık kalan Jeli tükürün.
- 30 DAKİKA yemek yemeyiniz ve hiçbir sıvı içmeyiniz.

SINIFLANDIRMA:

- Sınıf IIb Tıbbi Cihaz

