



JALOSOME® HYDRATING CREAM

Ürün Açıklaması

JALOSOME® Nemlendirici Krem, dış etkilere kaynaklanan, tahriş ve kızarıklık içeren dermal reaksiyonlar gibi cilt patofizyolojik değişiklikleri durumunda stratum corneum hidrofilik kapasitesini etkili bir şekilde korur. Tıbbi cihazdır; paraben, lateks ve gluten içermez. Jalosome® serisi aynı zamanda cilt enflamasyonunu ve buna bağlı ağrıları azaltmak için patentli tıbbi cihaz olan JALOSOME® Yatıştırıcı Jeli de içerir.

KULLANIM ENDİKASYONLARI:

Cildin daha önce maruz kaldığı radyoterapi, kimyasal peeling gibi tedavilerin sonunda kırılgan cildin cilt bütünlüğünü geri kazanması ve cildi korumak için endikedir. Doku yenilenmesine aktif olarak katkıda bulunur.

Etki Mekanizması

JALOSOME® Nemlendirici Krem cildin patofizyolojik değişimi durumunda stratum corneum'un hidrofilik kapasitesini geri kazandıran ve doku iyileşme sürecini destekleyen, nemli bir ortam yaratan farklı bileşenlerin bir emülsiyonudur.

Etki Mekanizması

Aloe Barbadensis Yaprağı Ekstresi

Sızma Zeytinyağı

Buğday Tohumu Yağı

Tatlı Badem Yağı

D-Pantenol

Özellikler

Yatıştırıcı ve Nemlendirici

Derinlemesine Nemlendirme

Besleyici

Yatıştırıcı ve Yumuşatıcı

Yenileyici ve Yatıştırıcı

Bileşenler:

Aloe Barbadensis Yaprığı Ekstresi,
Olea Europaea Meyve Özü,
Triticum Vulgare Tohumu Yağı (buğday tohumu yağı),
Prunus Amygdalus yağı,
D-Pantenol, yardımcı maddeler.

Sınıflandırma:

Sınıf IIa Tıbbi Cihaz

Pozoloji ve Uygulama Yöntemi:

Uygulamadan önce ellerinizi iyice yıkayınız. Yeterli miktarda ürünü alınız ve etkilenen bölgelere yumuşak ve dairesel hareketlerle uygulayınız. Tamamen emilene kadar ürünü dağıtınız. Gerektiğinde tedaviyi günde birkaç kez tekrarlayınız.

Kontrendikasyonlar:

Ürüne özel bilinen kontrendikasyon yoktur.

Özel Uyarılar ve Önlemler:

Bileşenlere karşı bir alerji durumu varsa, ürünü kullanmaktan kaçınınız. Hassasiyet ve duyarlılık durumunda tedaviyi durdurup, doktorunuzu bilgilendiriniz. Ürünü kullandıktan sonra çevreye atmayınız. Yutmayınız.

İlaçlarla etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri:

Bilinen etkileşim bulunmamaktadır.

Yan Etkileri:

Bilinen bir yan etkisi yoktur. Bileşenlere karşı aşırı duyarlılık ve alerji olması durumunda ürünü kullanmayınız, tedaviyi durdurup, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Uyumsuzluk:

Bilinen bir uyumsuzluk bulunmamaktadır.

Son Kullanma Süresi:

Ürün, açılmamış ve ambalajında doğru bir şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 35 ay içinde kullanılmalıdır.

Depolama için Özel Önlemler:

Serin ve kuru bir yerde, ısı, ışık ve nem kaynaklarından uzakta muhafaza ediniz. Ürün ilk açıldığında kutusu hasarlı veya tamamen sağlam değilse ürünü kullanmayınız. Ürünü paket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.